

平成 30 年 11 月吉日

お客様各位

株式会社タマツ

タマツの手すりシリーズ つながる手すり「すりてあ cuteZ」
の安全な使い方のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。「すりてあ cuteZ」発売以来販売数も伸び多くの方にお使い頂ける機会が増えました。

そこで、改めて安全な使い方についてお知らせいたします。置き型手すりとしての特長と製品の使用目的をご理解頂き、製品取扱説明書に加えて安全上の注意をお守り下さりますようお願い致します。何卒ご理解を頂きますよう宜しくお願い致します。

敬具

置き型手すり

特長

固定はされておられません。持ち運びが出来る手すりです
床面においてベースと手すりの自重で安定を保っております。

すりてあ cuteZ

使用目的

- ① 椅子ソファ等からの立ち座り動作の支援
- ② 移動歩行動作の支援
- ③ 座位・立位等の姿勢保持

安全上のご注意

11 月 15 日出荷分より製品取扱説明書にも挟み込みを行います。また、ホームページ等でも周知を行って参ります。


■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。



実行しなければならない内容

すりてあCuteZの使い方 手すりは体の横でご使用下さい

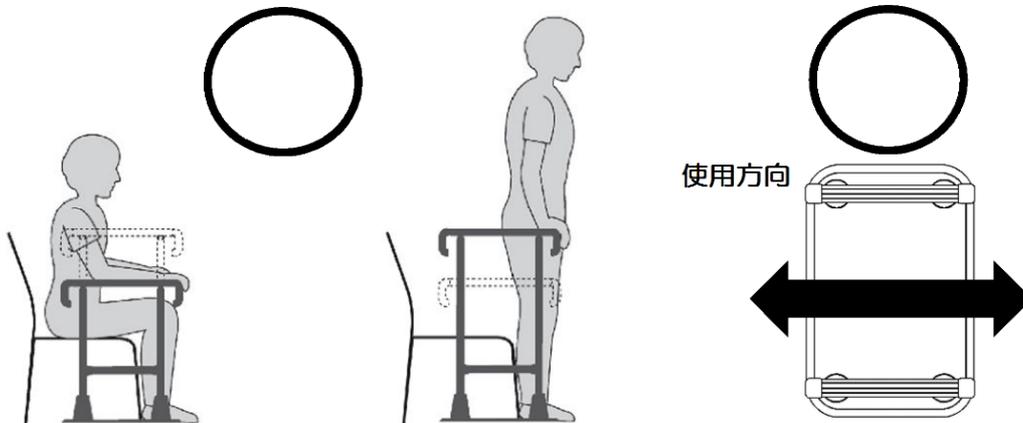


警告

死亡や重傷などを負うおそれがある内容

手すりを水平方向から使わない

水平方向に引くまたは押す

ベースの外側から手すりを使用しない

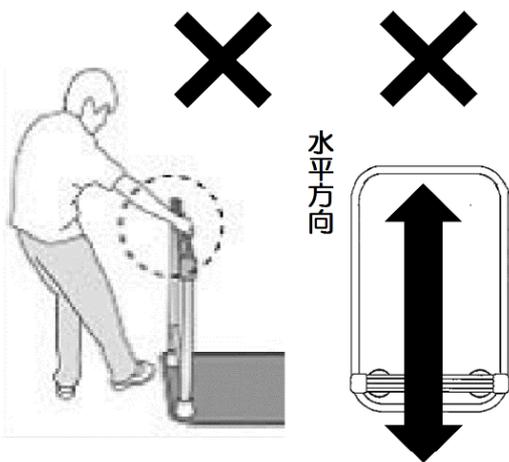

ベッドから 30 cm以上、離して使用する

正面設置はしない

