



取扱説明書

保存用

保証書付



安全にお使いになるための注意

このたびは、(株)タマツの製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や使用方法が説明してあります。
ご使用になる前には必ずお読みください。また、保証書が付いていますので紛失しないように大切に保管し、必要に応じてお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があることおよび物的損害の発生する可能性が想定されることを示します。

お守りいただく内容の説明



この表示は、してはいけない「**禁止**」の内容です。



この表示は、必ずしていただく「**強制**」の内容です。

警告

(禁止)



しては
いけない

- 手すりの補助以外の用途目的で使用しないでください
- 土台板が浮くような使い方はしないでください。
手すりが不安定になり、転倒してケガをする恐れがあります。
- 手すりに寄り掛かったり、ぶらさがらないでください。
破損や転倒の恐れがあります。
- 水などに濡れる場所で使用しないでください。
腐食による破損やすべて転倒する恐れがあります。
結露した場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。
紫外線による変質の恐れがあります。
- 火気の近くに設置しないでください。
熱で変質や破損を引き起こしたり、火災や火傷の原因になります。
- 改造や加工は絶対行わないでください。
性能の低下を引き起こし、事故の原因となります。



警告

(強制)



必ずして
いただく

- 手すりのe-Pinが確実にロックされているか確認してください。
しっかりはまっているか、手すりにガタつきがないか確認してください。
手すりの高さが急に変わり、転倒する恐れがあります。
- ベースと床面との段差につまずかないよう十分注意してください。
- フレームのすき間、踏み台のすき間に手、足、身体の一部が入らないよう
に十分注意してください。
- 持運びの際は商品が落下しないよう注意してください。
各部のネジがゆるんでいないことを確認してください。手すりの変形・破損・ケガの原因
となります
- ベース及び手すりフレームは必ず指定の位置に指定のネジで固定してください。
商品が変形したり、性能を低下を引き起こし事故の原因となります。
- 平らで水平な場所で使用してください。
- ベースが手前になるように設置してください。
必ず前後の昇降でご使用し、横からのご使用はしないでください。
- 設置後に安定性、利用者の身体状況をご確認の上、ご使用ください。
ご使用する状況が合わない場合は、ただちに使用をやめてください。

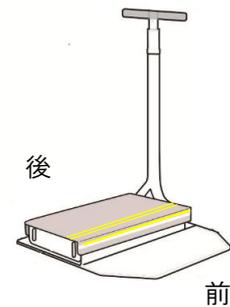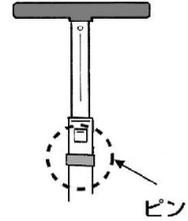


注意

(禁止)



しては
いけない

- 高温になる場所で使用しないでください。
- 踏み台はかまちの中に入れて使用しないでください。
- 踏み台はかまちから2cm以上離して設置しないでください。

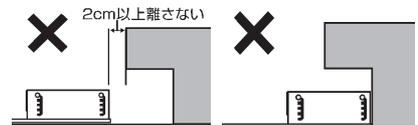


(強制)




必ずして
いただく

- 定期的に部品の破損、不具合がないか点検をしてください。
- 不具合がある場合は直ちに使用をやめてください。
- 設置や高さ調整は必ず販売店や福祉用具貸与事業者などの
専門家に依頼してください。
- 利用者の状態により、介護者が付き添うなど、安全には十分な配慮をしてください。
お買い上げの販売店や福祉用具専門相談員などの専門家に相談することをおすすめ致します。
- 取扱説明書をよく読み、操作手順どおりに使用してください。

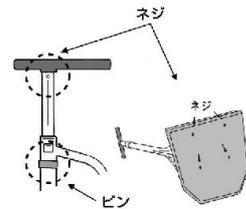

各部の名称

框02

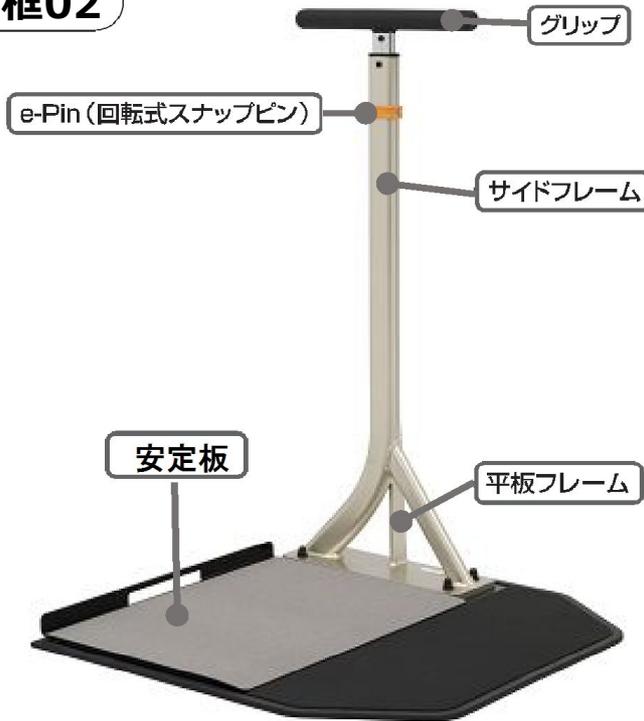

前

寸法



仕様

ステップバー(かまち)02	材質 [フレーム]	アルミ
	材質 [ベース]	スチール
	本体重量	26.0kg
	本体サイズ [mm]	W610×D600×H870~1020
	T A I S コード	00837-000010

框03



寸法



仕様

ステップバー(かまち)03	材質 [フレーム]	アルミ
	材質 [ベース]	スチール
	本体重量	26.0kg
	本体サイズ [mm]	W610×D600×H870~1020
	踏み台サイズ [mm]	W480×D350×H108~180
T A I S コード	00837-000015	


付属品

框03

以下の物が同梱されているか、確認してください。


●万一、不足品がありましたら、すぐにお買い上げの販売店、または弊社にご連絡ください。

踏み台（ネジ付）

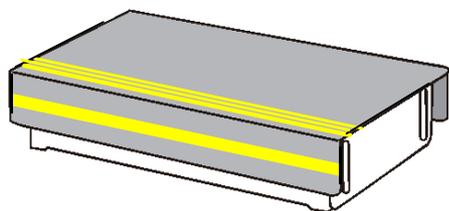

踏み台固定ネジ

M8×20皿ボルト4個・ナット4個・平ワッシャ4個
スプリングワッシャ4個

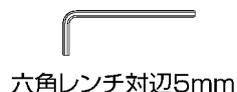

六角レンチ対辺5mm

手すり固定ネジ

M8×25皿ボルト4個・袋ナット4個・平ワッシャ4個



13mmスパナ



●お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部ことなる場合があります。

●ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

組み付け手順

ベース・手すり取付方法

●ベース板に手すりを取り付けてください。

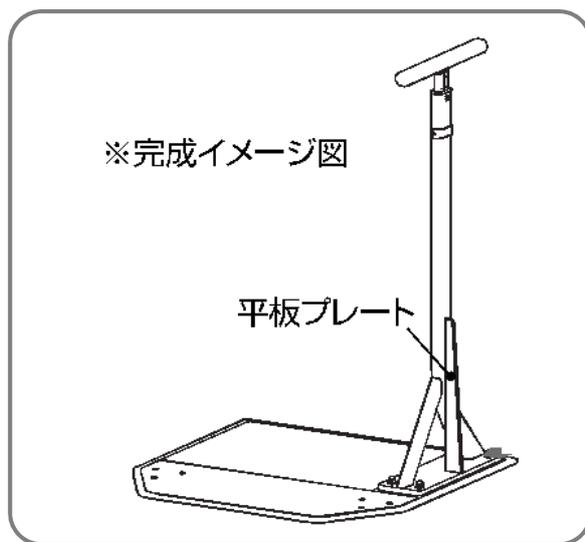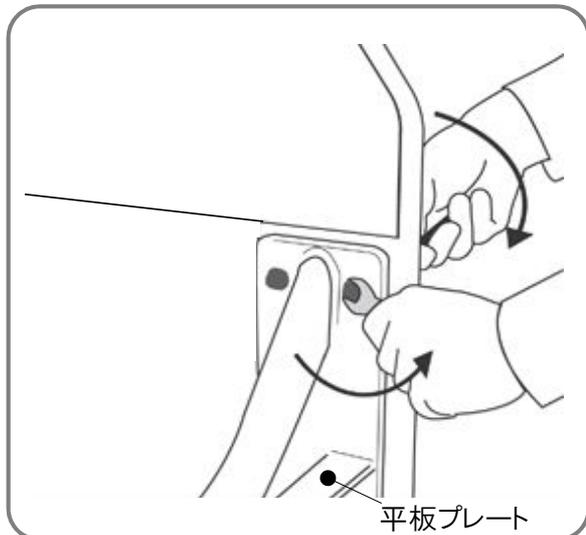

① 付属工具（スパナ、六角レンチ（5mm））と付属部品（皿ボルト、平ワッシャ、袋ナット）を用い、サイドフレームとベース板を組み立ててください。（4箇所）
その際、サイドフレームの平板プレートが外側になる様、取り付けてください。

※推奨トルク 12.3 N・m



警告

●サイドフレームとベース板が確実に固定されているか必ず確認してください。
（ケガ、転倒事故等の原因となります。）

していただく


框02

ステップバー框02 専用安定板 明細

① ベース板と安定板をベース板裏側から安定板固定ネジ(M8×12)を使用し六角レンチで締め付け固定します。

② 取付け位置はネジ山が見える対角線上の2箇所になります。

● がたつきが無いか確認してください。不具合があれば直ちに使用を止めてください。

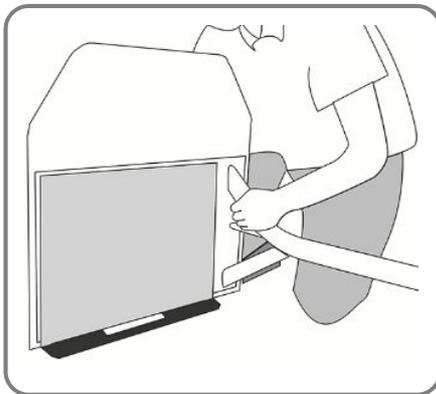


	品名	個数
①	ステップバー框02用安定板上部	1
②	ステップバー框02用安定板下部	1
③	安定板固定ネジM6×8	4
④	安定板ベース固定ネジM8×12	2
⑤	六角レンチ	1

重量:10kg 材質:スチール

● 取付位置はネジ山が見える対角線上の2か所になります。


右側手すり 取付位置

右上、対角線上に取付

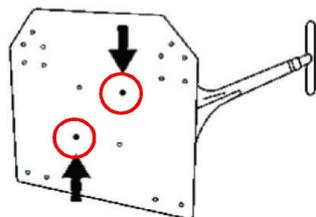

左側手すり 取付位置

左上、対角線上に取付

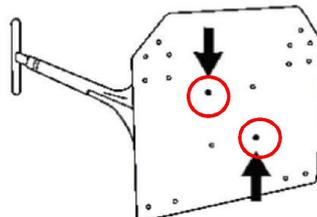

安全にお使いになるための使用方法

手すり高さ調整 (框02・03共通)





- ① e-Pinを外します。
- ② 目盛りを目安に、手すりを適切な高さに合わせます。



！
ピンがしっかり入っているか
確認してください

e-Pinの取付け方


- ③ パイプの穴を合わせてピンを挿入します。
- ④ 奥まで挿入したら「くるっ」と回転させます。
- ⑤ 反対側の穴にピンの頭が出ていることを確認します。

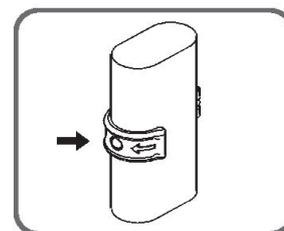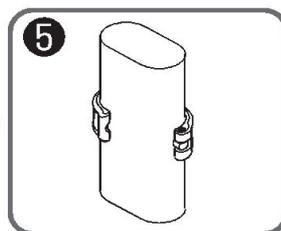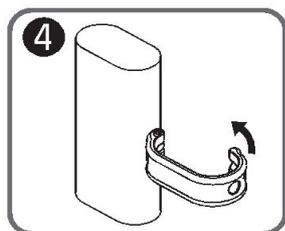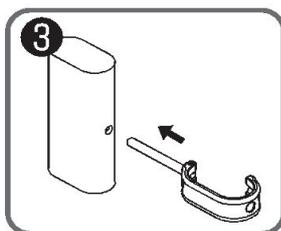

踏み台の取付方法

①高さ調整ネジ4箇所を外し、天板を取り外してください。 六角レンチ対辺5mmを使用してください。

①

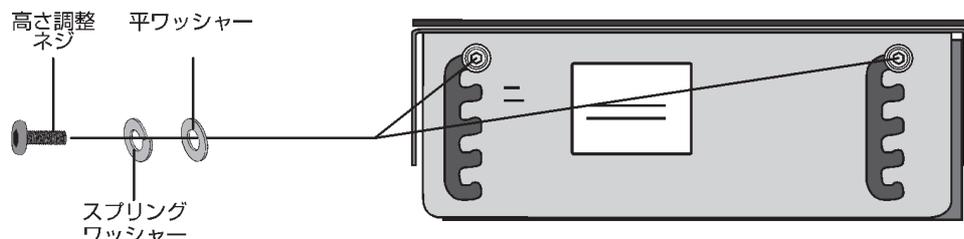


※反対側も同様に外します。

②踏み台取付けネジ4本をベースのネジ穴に合わせて底板を取付けてください。

※底板の取付位置、方向に注意してください。


②

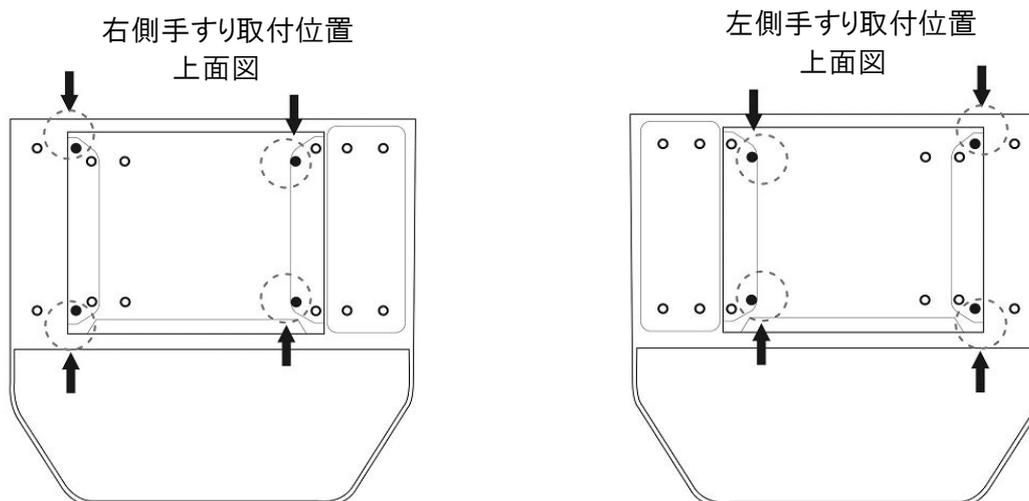

③天板は側面のラベルで設置方向を確認し、底板にはめ込んでください。

踏み台の高さを決めたら高さ調整ネジを締め付けてください。


③

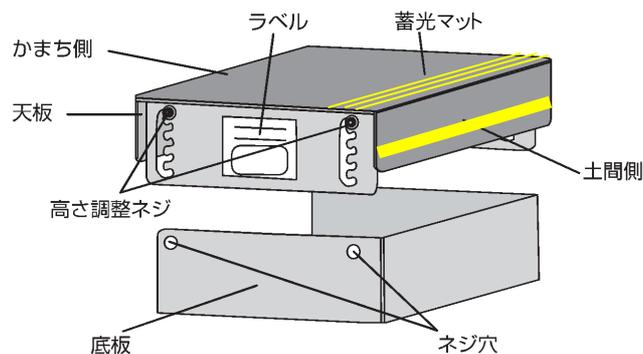


踏み台の高さ調節方法

●踏み台の高さ調節(108~180mm、18mmピッチ)が可能です。六角レンチ対辺5mmを使用してください。

①高さ調整ネジ4箇所を3回転程度ゆるめて下さい。 ※ネジを取り外さなくても高さ調整ができます。

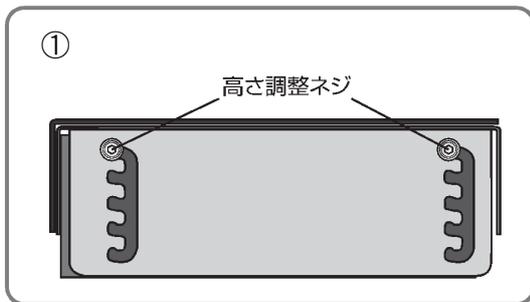


②踏み台の天板を持ち上げ、側面の高さ調整溝に合わせて調節してください。
高さ調整を合わせた後、高さ調整ネジ4箇所を締め付けてください。

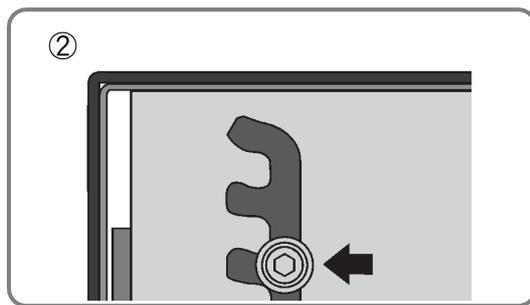

※推奨トルク 4 N・m

③必ずネジ(4箇所とも)がイラストのように同じ高さの溝にはまっているか確認する。

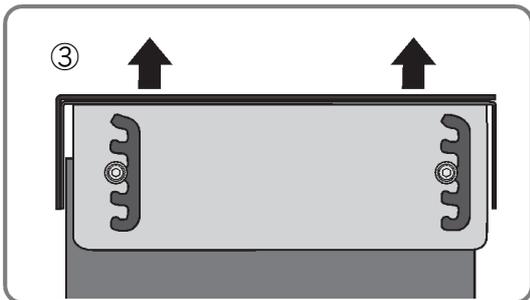


⚠ 注意

●踏み台の取付け方法は必ず守ってください。足をはさんで転倒やケガのおそれがあります。

していただく


使用方法

前向き姿勢

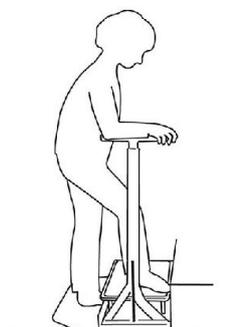

上がり框を上る


踏み台を框の段差を乗り越える高さにして安全に上ります。手すり高さを調節し、手や肘で体を支えます。

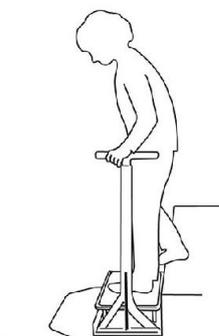

上がり框を下りる

手すりにつかまり段差を下ります。踏み台の利用により、体のふらつきを防ぎます。

横向き姿勢

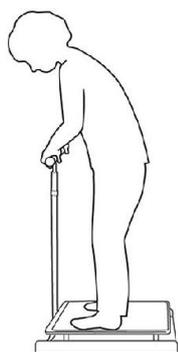


頭の位置が手すりより前になることで、より安定した姿勢で利用できます。



両手でつかまり安定性を保ちます。

設置例

踏み台で段差を低くし、手すりを利用して上がります。

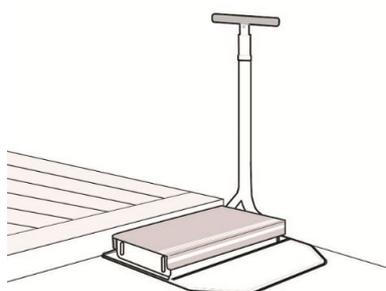

手すりだけが必要な方



点検・整備&お手入れの方法

- 各部の緩み、ずれ、ねじれ、傷、破損を点検し、異常があれば修理してください。
- マット、シート類の摩耗、破れなどを点検し、使用限度を超えたものは交換してください。
- お手入れは、水か適量に中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン類、動植物性の油は使用しないでください。パイプの腐食の原因や樹脂部品等の劣化につながり、破損してケガをする原因となります。
- タワシや磨き粉、研磨入りのスポンジ等は使用しないでください。
パイプに傷がついたり破損の原因となったり、ケガをする恐れがあります。
- 日陰の通気性の良いところで乾燥させてください。

保管場所 次のようなところでは、保管しないでください。故障の原因となります。

- 雨に濡れるようなところ
- 直射日光が当たるようなところ
- 湿気の多いところ
- 高温になるところ
- 炎天下

保証

- 保証期間は、お買上げ後1カ年です。(本体、付属品共)ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 1. 火災、天災による故障・損傷の場合
 2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
 3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
 4. 土台板のゴムの磨耗、保護シートの破れなど消耗品や各部の劣化による故障・損傷の場合
 5. 修理に要した運賃等の諸経費
- この保証書は日本国内のみ有効です。

アフターサービス

万一故障の場合は、お買上げいただきました販売店、または(株)タマツへ保証書ご持参の上、修理をお申しつけください。

保証書

品名	框02・框03	お買い上げ日	年 月 日
ご住所 〒			
お名前		様	TEL () -
販売店	住所 〒 店名 TEL () - 担当者	 〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-7 TEL0235-23-6333 FAX0235-25-3889 URL http://www.tamatsu.jp	



〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-7
TEL0235-23-6333 FAX0235-25-3889
URL <http://www.tamatsu.jp>