


取扱説明書

トイレの姿勢保持手すり

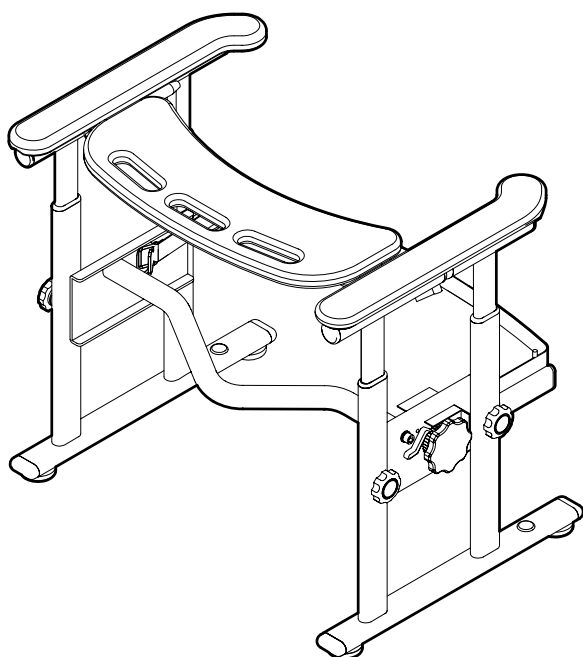

保管用
保証書付き



品番 MT-100

最大使用者体重:100kg

品番 MT-100

も く じ

● 安全上のご注意	 1 ~ 3
● 各部の名称・仕様	 4
● ご使用方法	 5 ~ 8
● お手入れ方法	 9
● 安全点検表	 9
● 保証とアフターサービス	 10
● お客様相談室のご案内	 11

ご使用になる前に必ずお読みください

このたびは、「まえてあ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に必ず「安全上のご注意」(1~3 ページ)をお読みください。
- 保証書は、お買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■安全上のご注意■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています



警告

死亡や重傷などを負うおそれがある内容



注意

軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容



実行しなければならない内容



警告



禁止

■ 製品は、洋式トイレ用の立ち上がり・座り補助の据え置き式手すりです。それ以外の用途には使用しない。



禁止

■ すき間や開口部に身体の一部をはさまない。

ご使用者の心身の状態や利用状況によって、すき間にはさまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。特に、頭部や首、腕や足がはさまれないよう十分ご注意ください。



禁止

■ 予測をできない行動をとる方や、自力で危険な状態から回避することができない方は使用しない。

ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すり部の隙間に身体の一部を入れる可能性があります。場合によっては生命の危険にかかわる事故につながるおそれがあります。自力で危険な状態から回避する事ができない利用者（認知症など）の方につきましては、ご使用を控えてください。
※ 重度者の方が使用される場合は、直ちに使用を止め、医師や介護士、ケアマネージャー、福祉用具専門相談員などの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。



禁止



■ ひじ掛けにぶら下がったり寄りかかったりしない。前手すりの上に乗ったり座ったりしない。



禁止

■ 座る時や使用後に立ち上がる時など、片側のひじ掛けに全体重をかけない。

転倒やケガの原因になります。



禁止

■ 故意にゆすらない。

転倒やケガの原因になります。



禁止

■ 手すりが濡れた状態で使用しない。

転倒やケガの原因になります。



禁止

■ アジャスターは5mm以上伸ばさない。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



禁止

■ 製品が破損、または正常な状態でないときは使用しない。

製品や設置が正常でない時に使用するとケガの原因になります。



禁止

■ 体重が100kgを超える方は使用しない。

本体が破損しケガをするおそれがあります。



禁止

■ ひじ掛けを便器前方に引っ張らない。

便器から製品がはずれ、転倒やケガの原因になります。



禁止

■ 取り付け可能な便器以外には取り付けない。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



禁止

■ 床に腐食やガタツキがある場合には取り付けない。

床全体に強度がない場合は全体重がかかった時、本体がはずれケガをするおそれがあります。

警告



必ず守る

- 前手すりを装着して使用する場合は必ず
介助者が付き添って使用する。

使用状態を必ず確認して下さい。自力で危険な状態から回避する事ができない利用者（認知症など）の方につきましては、ご使用を控えてください。



必ず守る

- 高さ調節つまみはしっかりと締め付ける。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

- 前手すりは可動範囲内で使用する。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

- 前手すりはノブボルト、クランプレバーで
固定し動かないことを確認する。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

- 定期的にネジのゆるみなど各部に異常が
ないか点検する。

本体が正常にはたらかず、破損やケガのおそれがあります。



必ず守る

- ジョイントバーを便器に押し付けた状
態で使用する。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

- 前手すりの付け外しや収納するときは、
前手すりを落とさないよう注意する。

落とすとケガや製品が破損するおそれがあります。



必ず守る

- 必ず便器に固定して使用する。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

- 使用中に製品を前後・左右にゆらしてガ
タツキやずれがないか確認する。

取付が不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

- 絶対に分解したり、修理、改造をしない。
部品の代用品は使用しない。

本体が正常にはたらかず、破損やケガのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



必ず守る

- ひじ掛けの高さ調整を行なう時は指を
はさまないように注意する。

ケガをするおそれがあります。

注意



禁止

- 製品は直射日光の当たらない乾燥した
常温の室内で保管する。

色あせやひび割れの原因となります。



禁止

- 直射日光にあてたり火気に近づけない。

色あせやひび割れの原因となります。



禁止

- 樹脂製便器には取付けない。

便器が破損しケガをするおそれがあります。



禁止

- トイレマットの上に設置しない。

不安定になり転倒やケガの原因となります。



禁止

- ノブボルトやハンドルは工具を使って締
め付けない。

破損の原因となります。



禁止

- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポン
ジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカ
リ性洗剤、シンナー、クレゾール等は
使用しない。

プラスチックが劣化または破損しケガをするおそれがあります。

注意



必ず守る

- 便器にしっかりと固定されている
ことを確認する。

取付が不安定になりケガの原因となります。



必ず守る

- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい
布にふくませて洗った後洗剤が残らないよう
に水洗いし、乾いた布で水分をふき取る。

洗剤がついているとすべりやすく、転倒しケガをするおそれがあります。

安全にお使いいただくために

使用前に製品を前後・左右にゆらしてガタツキやずれがないか確認してください。
ガタツキがある場合は下記の項目をご確認ください。

■ **ジョイントバーの角度調整。**

ジョイントバーの角度を便器の形状に合うように調整しセットして下さい。

■ **ひじ掛け高さ調節つまみがゆるんでいる可能性があります。**

調節つまみを締め直してください。

■ **アジャスターが調整されてなかったりはずれている可能性があります。**

アジャスター調整または取り付けてください。

■ **ベルトの締め付けが弱くゆるんでいる可能性があります。**

ハンドルを右に回して締め付けてください。


■ **前手すりが固定されていない可能性があります。**

可動範囲内であることを確認し、ノブボルト、クランプレバーで締め付けてください。
前手すり裏面のネジを締め付けてください。


■ **床固定をしている場合、ネジがゆるんでいる可能性があります。**

お客様は修理を行わず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。


■各部の名称・仕様■

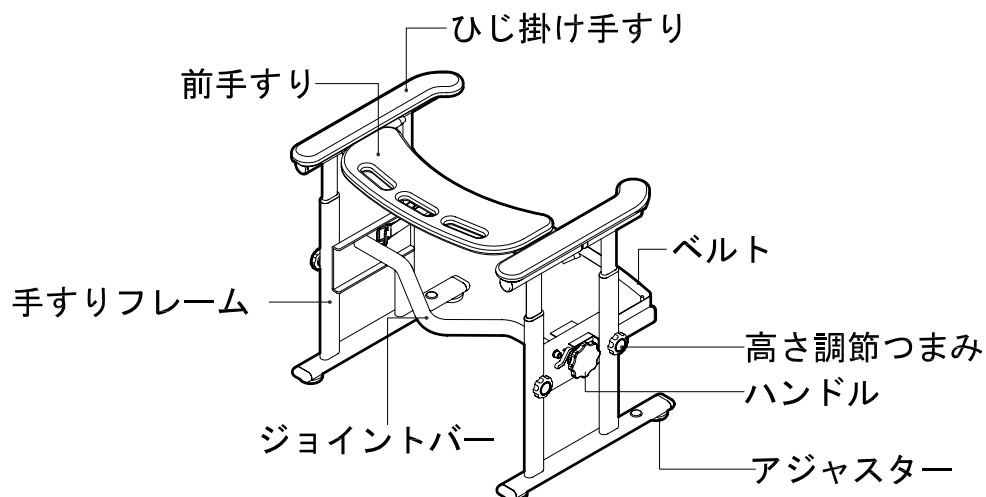


正面図

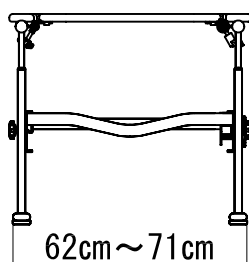

横断面図

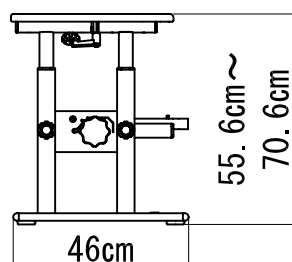

上面図

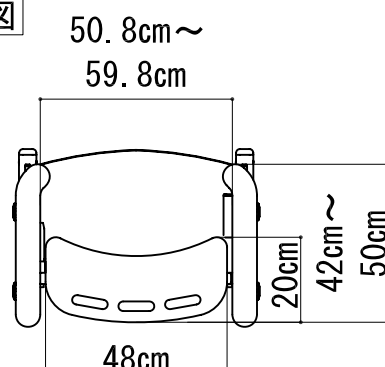


製品名	まえてあ		
製品品番	MT-100	製品質量	1 3 kg
TAISコード	00837-000018	最大使用者体重	1 0 0 kg
サイズ	手すりフレーム寸法	幅 6 2 cm～7 1 cm（無段階）×奥行 4 6 cm	
	手すり高さ	5 5 . 6 cm～7 0 . 6 cm（6段階調節）	
	手すり間寸法	5 0 . 8 cm～5 9 . 8 cm（無段階）	
	前手すり寸法	幅 4 8 cm×奥行 2 0 cm	
材質	ひじ掛け手すり：天然木 前手すり：天然木 手すりフレーム：ステンレス ジョイントバー：芯材ステンレス 樹脂被膜 高さ調節つまみ：樹脂 アジャスター：合成ゴム ハンドル：樹脂 ベルト：合成ゴム		

■ ご使用方法 ■

本製品は以下の機能があります。

前手すりの位置を前後に最大80mm位置調節ができます。

トイレ使用時に前方に大きな手すりがあるため、座った時の姿勢保持や排泄しやすい前傾姿勢を保持できます。

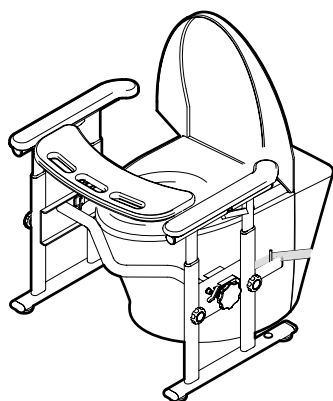


警告

ひじ掛けや前手すりの上に乗ったり、座ったりしないでください。

前手すりは下図のように縦にした状態で差し込むことによりコンパクトに収納できます。差し込んだ後は前手すりが動かないようにクランプレバーで固定してください。取り出す場合は上記の逆手順になります。

※肘掛けの高さ、幅により前手すりが地面と接触しうまく収納できない場合があります。その場合は取り出しやすい安全な場所に保管してください。

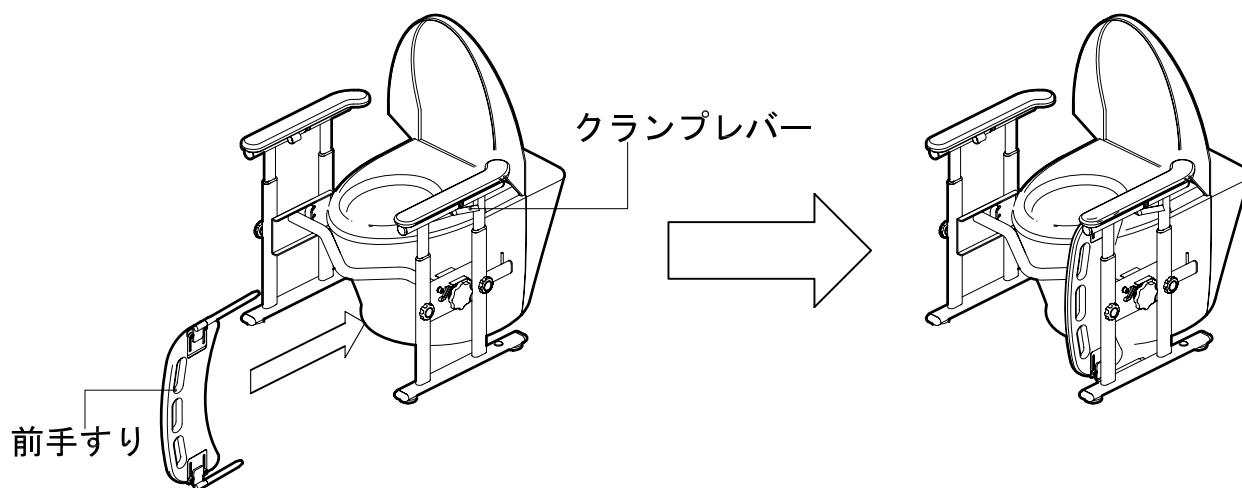

※裏面がトイレの外側を向くように収納してください。


警告

前手すりの付け外しや収納するときは、前手すりを落とさないでください。

■ ご使用方法 ■

便座への移乗、立ち座り動作の場合


前手すりがある場合は、クランプレバー、ノブボルトを左に回し、前手すりを取り外してください。

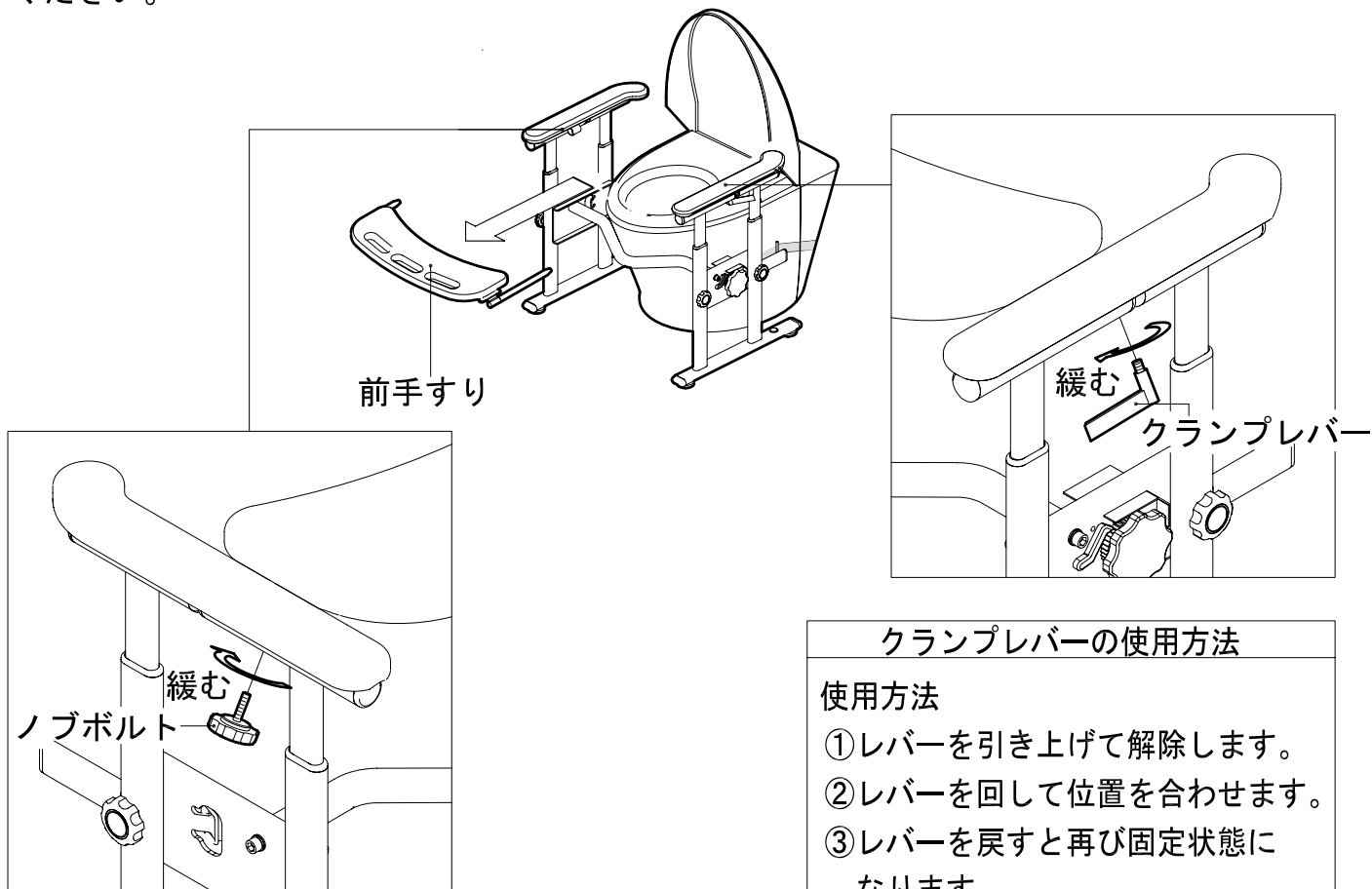

クランプレバーの使用方法


使用方法

- ①レバーを引き上げて解除します。
- ②レバーを回して位置を合わせます。
- ③レバーを戻すと再び固定状態になります。

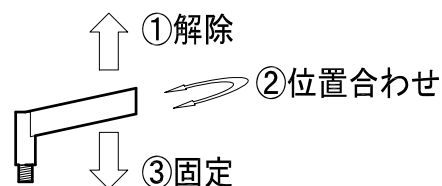

⚠ 注意

ノブボルト、クランプレバーの先端がパイプ内に出ていると前手すりがスムーズに抜き差しできません。
ノブボルト、クランプレバーの先端がパイプ内に出ていない位置まで回してください。


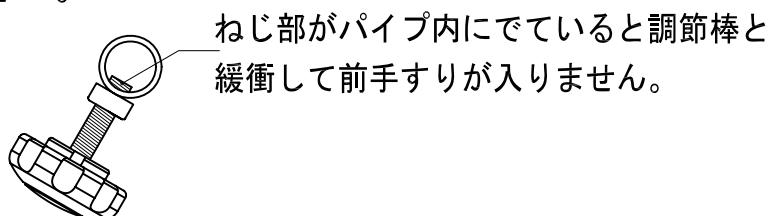


■ ご使用方法 ■

前手すりを差し込み、ノブボルト、クランプレバーを右に回してしっかり固定してください。

前手すりの固定位置は使用者によって違います。

8 ページの説明をよくお読みの上、正しくご使用ください。

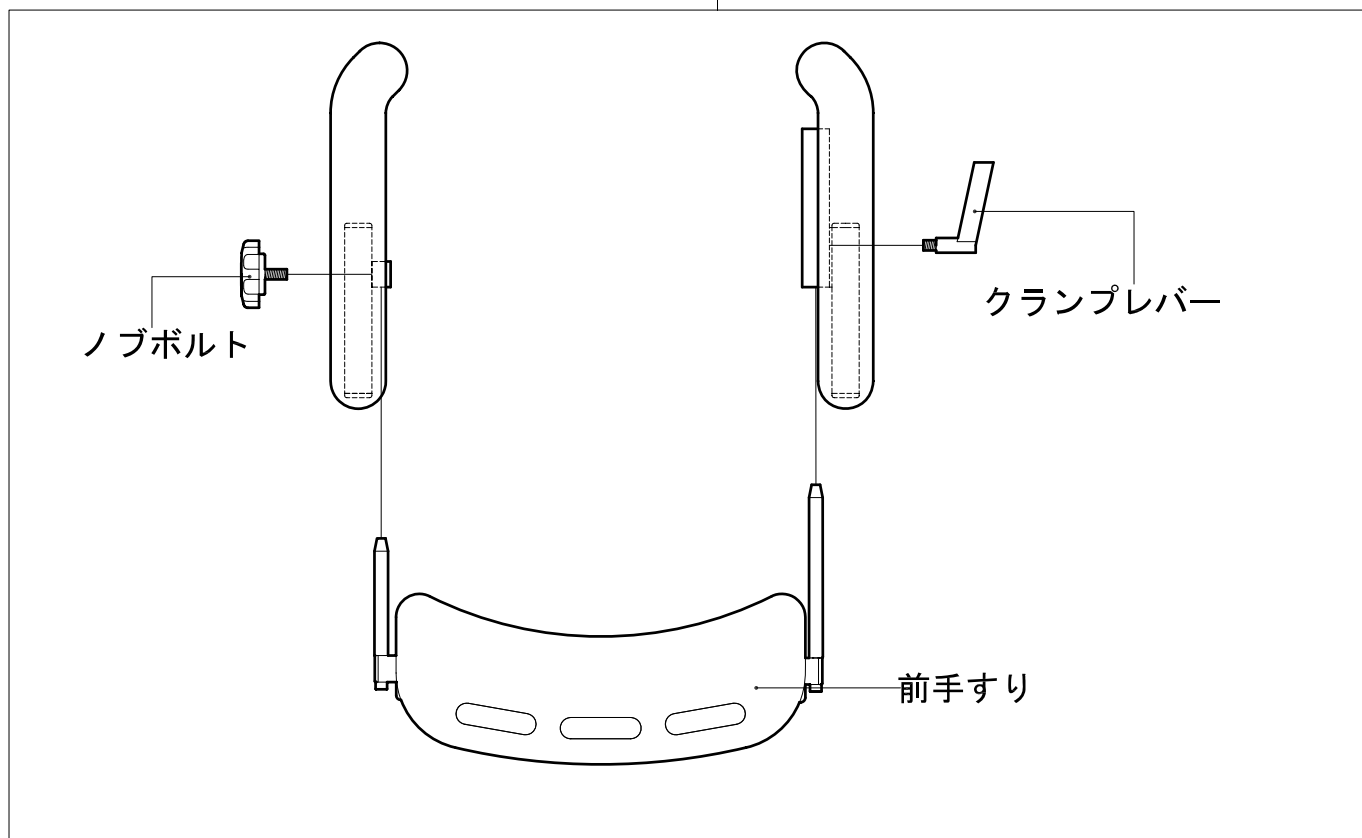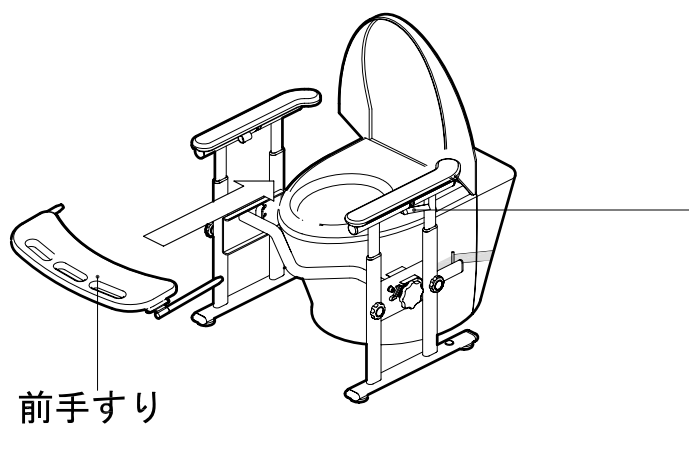



警告

前手すりを可動範囲外で固定しないでください。

■ ご使用方法 ■

前手すりの前後調整

使用者に合わせて前手すりの位置
を前後に最大80mmの可動範囲で
合わせてることができます。

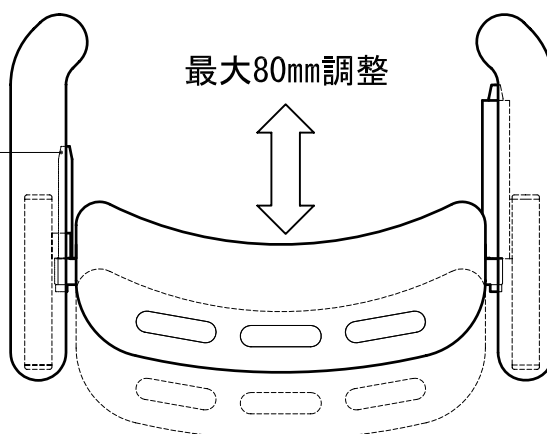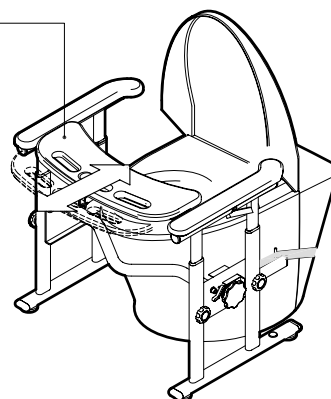

⚠ 警告

ノブボルト、クランプレバーで固定した後は、前手すりが動かないことを
確認して使用してください。

■お手入れ方法■

●日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、中性洗剤のうすめ液をスポンジか柔らかい布に含ませて洗った後洗剤が残らないように水洗いし、乾いた布で水分を拭き取ってください。



注意

下記のものは、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

製品を傷つけるものを使用しないでください。

変色、劣化の原因になり製品が破損するおそれがあります。

●消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。



注意

下記のものは、消毒に使用しないでください。

オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）

■安全点検表■

「まえてあ」点検シート		※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。												
安全点検項目	点検結果（該当には○）													処理手順
	日付													
手すりが破損している														○印があるときは、危険な状態になっていますので、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。
手すりフレームが変形している。														
ベルトが破損している														
変色がある														

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

上記の点検項目以外でも不具合があれば、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

■保証とアフターサービス■

●保証書について

保証期間は、お買い上げ後 1 年間です。（本体、付属品共）

ただし、次の場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

1. 火災、天災による故障・不詳の場合
2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
3. 無断仕様変更及び、改造による故障
4. 縁ゴムの摩耗、消耗品や各部劣化による故障・損傷の場合
5. 修理に要した運賃等の諸経費

●この保証書は日本国内のみ有効です。

●補修用性能部品の保有期間

当社は「まえてあ」の補修用性能部品の製造打ち切り後、

5 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は
まず、お買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

製品は厳格な検査を経ております。万一不具合がございましたら、
弊社またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

お客様相談室フリーダイヤル 0120-^{ふくし}294-^{ようぐ}409

お客様相談室における個人情報のお取り扱いについて

株式会社タマツでは、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



本社/山形県鶴岡市美咲町32-7(〒997-0857)
TEL(0235)23-6333/FAX(0235)25-3889



タマツ ホームページ

保証書	商品名		お買い上げ日	年	月	日	
	ご住所	〒					
	お名前			TEL			
	販売店	住所 〒	店名	 本社 / 山形県鶴岡市美咲町 32-7 (〒997-0857) TEL 0235 (23) 6333 / FAX 0235 (25) 3889			
		TEL					