


トイレの姿勢保持手すり



組立・施工の仕方 →

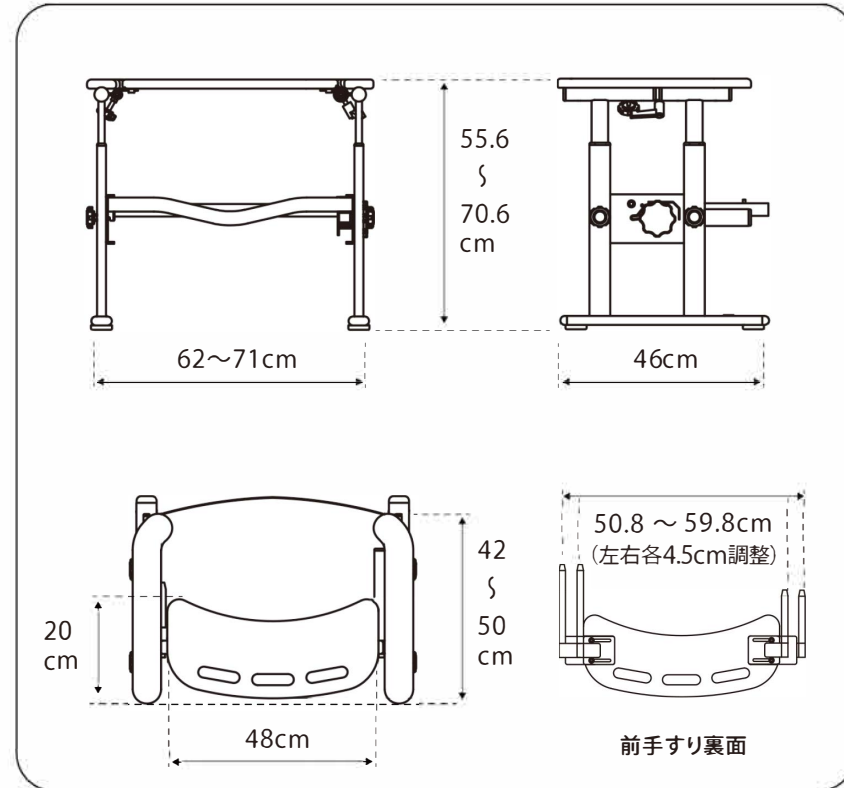

製品名	まえてあ	材 質	手 す り: 天然木
製品番号	MT-100		手すりフレーム: ステンレス
TAISコード	00837-000018		ジョイントバー: 芯材ステンレス・樹脂被膜
製品質量	13kg		高さ調節つまみ、ハンドル: 樹脂
最大使用者体重	100kg		アジャスター、ベルト: 合成ゴム
価 格	140,800円 (税抜128,000円)		

警告

禁止
しては
いけない

- 前手すりの上に乗ったり座ったりしない。
- 予測をできない行動をとる方や自力で危険な状態から回避することができない方は使用しない。



必ず守る
!

- 前手すりを装着して使用する場合は、必ず介助者が見守って使用する。
- 前手すりは、可動範囲内で使用し、ノブボルト・クランプレバー・ネジで必ず固定する。



設置取付けは、納入業者または福祉用具専門相談員などの専門員に依頼してください。

■ お申込み・お問合せ



〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-7
TEL 0235-23-6333 FAX 0235-25-3889
【ホームページ】 tamatsu.co.jp

タマツの手すりシリーズ
トイレの姿勢保持手すり



登録商標第6125435号 意匠登録申請済

快適な排泄姿勢を保ち、自立を支援



いつまでも トイレで気持ちよく排泄したい

排泄環境を整え、自立を支援することは、その人の尊厳を守ることです。

「トイレの姿勢保持手すり まえてあ」は
付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の
手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。

姿勢崩れに対応

左右の姿勢の崩れ



前方への姿勢の崩れ



突然の体調変化による姿勢崩れ




必要性に応じて付け外しできます。




前手すりは、手すりフレームに
収納しレバーで固定します。

排泄姿勢の保持

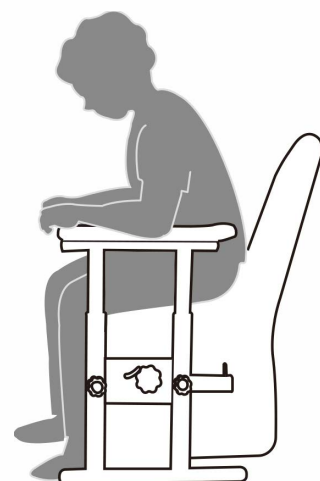

いきみやすいように、前かが
み姿勢をとり、しっかりと足
を床につけます。

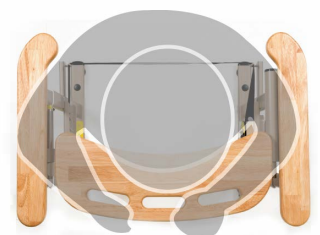

広い前手すりと左右の
手すりで前屈姿勢を支
えます。



工事不要で、必要な時に簡単に取り付けができるので
医療・福祉施設ほか、幅広い場所でご使用いただけます。

多くの便器形状に対応

- ① ウォシュレット スイッチ壁付
- ② ウォシュレットスイッチ便座付
- ③ 公共モデルの手すり内に設置



環境・身体状況に応じて調節可能



肘高 55.6～70.6cm
(3cm きざみ 6段階)



前手すりの調節

前手すりの調節
シールの見える可動範囲内で使用し、
確実に固定する。
ノブネジとクランプレバーで固定。

工事不要、簡単取付



ジョイントバーの位置調整 ↑

← ダイヤルを回し、ベルトを締め付け固定。



ノブネジ

クランプレバー