


Step・Bar[®] 床 仕様

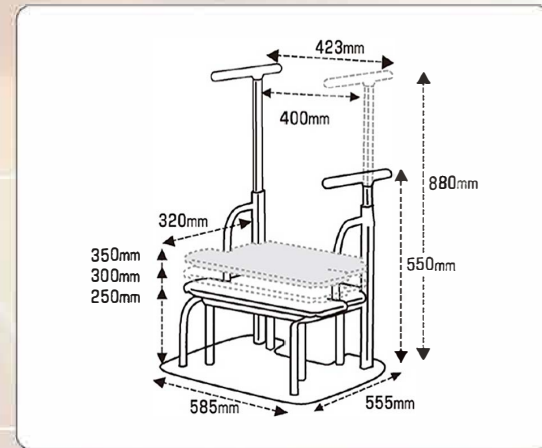


材質(フレーム)	アルミ
材質(ベース)	スチール
本体重量	17.5kg
本体サイズ(mm)	W585×D555×H550~880
パットサイズ(mm)	W556×D320×H250・300・350
TAISコード	00837-000007
価格	85,800円(税抜78,000円)

《 使用例 》

布団からの起き上がり

- つかまりやすい場所に設置します。
- 肘を支点に上体を起こし、パイプにつかまって身体を引き寄せて起き上がります。

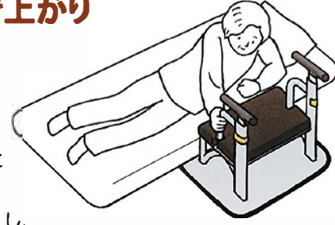


ベッドや椅子からの立ち上がり

- 手すりは左右ともに、高さを調節することができ、立ち上がりやすい位置に移動して設置します。
- 片側に体重をかけても安定しています。



オプション【補助板】 保護シート付き

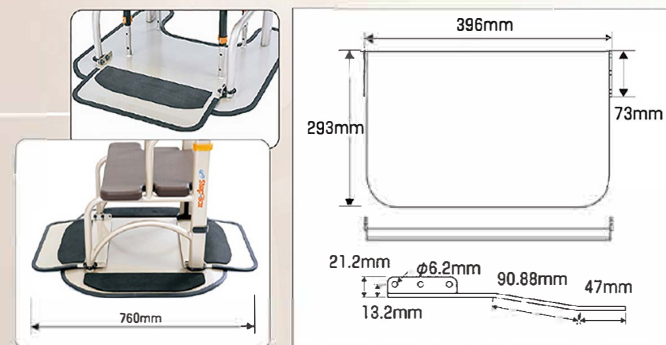

- 補助板をフレーム本体の前後に取り付けることで、ベースが大きくなり安定性が高まります。
- 裸足でふれても冷たくないよう、また膝をついても痛くないよう保温・緩衝材となる保護シートがついています。
- ※ 前後の補助板は、同じ大きさで取り付け金具が違います。

材質(ベース)	スチール
本体重量	5.2kg
本体サイズ(mm)	W396×D293
価格(2枚組)	10,780円(税抜9,800円)

警告

禁止

してはいけない

土台板が浮くような使い方はしないでください。

強制

必ずしていただく

台の上で立ち上がらないでください。

手すりやフレームのすき間に頭や首等の身体の一部が入らないように十分注意してください。

e-pinが確実にロックされているか確認してください。

設置取付は、納入業者または福祉用具専門相談員などの専門家に依頼してください。

■お申込み・お問合せ



山形県鶴岡市美咲町32-7(〒997-0857)
TEL (0235) 23-6333 FAX (0235) 25-3889

お客様相談窓口 ☎ 0120-294-409
【ホームページ】 <http://tamatsu.co.jp>

台付立ち上がり専用手すり ステップバー



手すりと台で床からの立ち上がりがグンと楽になります



台付立ち上がり
専用手すり
ステップバー

Step Bar 床 02

◎登録意匠 第1329729号 ◎意匠登録申請済

つかまる、起こす、支える機能を、さらに使いやすくしました



保温・緩衝材となる
保護シート付き。



床から




楽な立ち上がりにつながるポイント

- ① 立ち上がる際に、手や肘をついて状態を傾ける。
- ② 指示した手の位置より前方に頭や上体を持っていける。



① グリップは、取り替えが
できます。

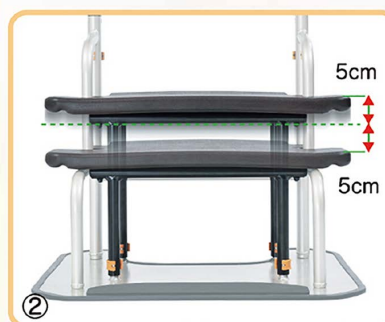

② パットの高さは5センチ
間隔で、3段階の調節が
でき、状態に合わせた
使用ができます。



③ コンパクトになって軽く、
運びやすくなりました。

安定した握りで身体を支えたり、腕をしっかりのせることができます。



立ち上がりや起き上がりをしっかりサポート 手すりと台で床やベッドからの立ち上がりがグンと楽になります


床から立ち上がるには、3つのステップが必要です

Step 1 この体勢になる


❗ ひざを伸ばしたまま身体をねじるのが
ポイントです。腰をねじりながら、身体
を横に向けて、這う姿勢になっていきます。
この「ねじり」が、立ち上がりを助けてくれます。



ひざを伸ばして座ります。

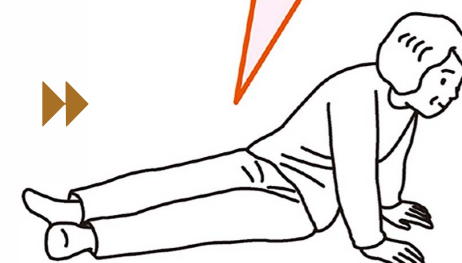

手をついて、
身体をねじって斜め後ろへ。

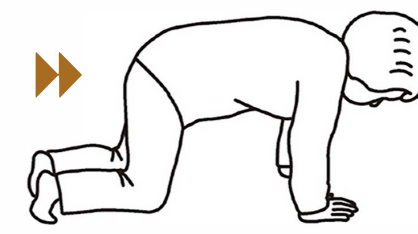

這う体勢に体勢になります。

Step 2 台を使って高這いになる

這う体勢から台に手をつけば
上体が安定します。



台に手をついてひざを立て
上体を前に傾ける。



腰を上げて上体を起こして
高這いになります。



Step 3 高さの違う2本の手すりを使って 徐々に腰をのぼす

高這いから①→②→③→④
の低い位置の順で
手をついて
腰を伸ば
します。



パイプと2本の手すりを使い
徐々に上体を
起こします。



腰を伸ばして
立ち上がり
ます。

